

Let's workflow it



... mit dem Zirkon Workflow Set von der Weißlingsbearbeitung bis zur Politur alles in einem Set.

... with the zircon workflow set from processing pre-sintered zirconia to polishing all in one set.

Bearbeitung des Weißlings vor dem Sintern

Processing of pre-sintered zirconia



Step 1

Weißlingsbearbeitung und Politur

- Raustrennen, Verputzen, Strukturieren mit Keramik-Fräsern
- Polieren mit dem 2 in 1 Polierer mittel/fein

processing and polishing pre-sintered zirconia

- separating, plastering, structuring with ceramic cutters
- polishing with the 2 in 1 polisher medium/fine




Step 2

Diamantdurchsetzte Schleifkörper

- **ohne** Wasserkühlung einsetzbar
- Ausdünnen von Rändern, Formkorrekturen

diamond interspersed abrasives

- to be used **without** water cooling
- thinning of edges, shape corrections

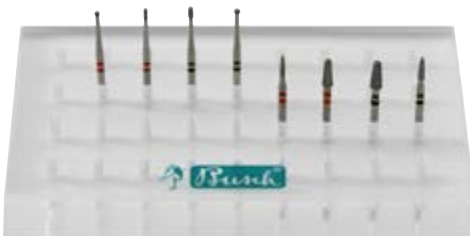

Step 3

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung

- filigrane Feinkorrekturen:
- grün, schwarz: grobe Körnung
 - rot, rot: feine Körnung

ZIRAMANT instruments with special diamond coating

- filigree fine corrections:
- green, black: coarse grit
 - red, red: fine grit



Step 4

Diamantdurchsetztes Poliersystem

- Politur - 2-stufig
1. türkis, gelb: mittel
 2. rosa, gelb: fein

diamond interspersed polishing system

- polishing - 2-step
1. turquoise, yellow: medium
 2. pink, yellow: fine



Step 5

Bürste und Diamant-Polierpaste


- Hochglanzpolitur mit 3µ Diamantpaste

brush and diamond-polishpaste

- high shine polishing with 3µ diamond paste

Plexiglassockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Acrylic glass base not included in delivery.

Zirkon Workflow Set

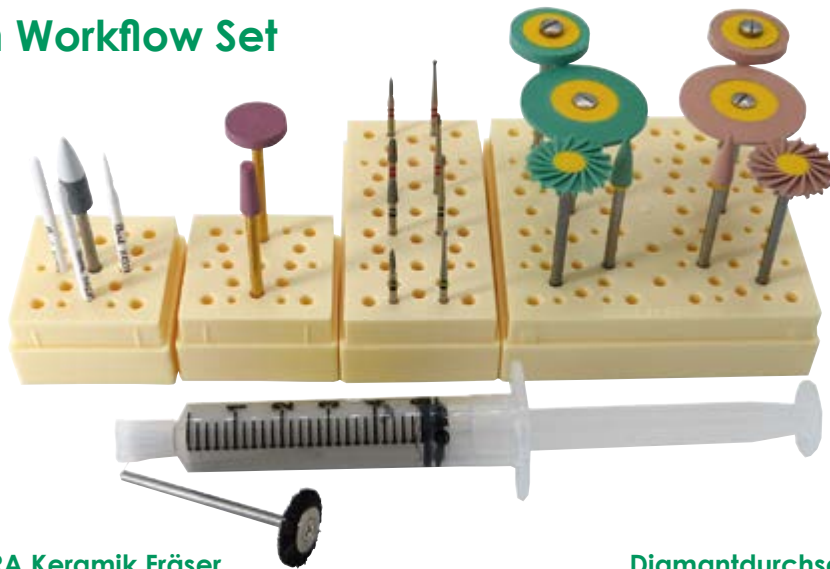

2 in 1 Polierer / KERA Keramik Fräser 2 in 1 polisher / KERA ceramic cutters

Step 1

| | | | | |
|--------|------|-------|-------|--------|
| HST/HP | 9800 | K433X | K426X | K423FX |
| ISO Ø | 055 | 016 | 023 | 023 |

Diamantdurchsetzte Schleifkörper Diamond interspersed abrasives

Step 2

| | | |
|--------|------|------|
| HST/HP | D702 | D723 |
| ISO Ø | 120 | 040 |

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung ZIRAMANT instruments with special diamond coating

Step 3

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| FG lg | 6855Z | 6860Z | 8855Z | 8860Z | FG x-lg | 6801LZ | 6838LZ | 8801LZ | 8838LZ |
| ISO Ø | 025 | 014 | 021 | 010 | ISO Ø | 014 | 012 | 011 | 009 |

2-stufiges diamantdurchsetztes Poliersystem 2-step diamond interspersed polishing system

Step 4

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| HST/HP | 9854 | 9853 | 9855 | 9864 | 9863 | 9865 | 305RS |
| unmontiert unmounted | | | | 9856 | | | 9866 |
| ISO Ø | 040 | 260 | 170 | 170 | 040 | 260 | 170 |
| | | | | | | | 050 |

Pferdehaarbürste, harte Borsten Horsehair, hard bristles

Step 5

| | |
|--------|------|
| HST/HP | 9736 |
| ISO Ø | 140 |

Hochglanzpolierpaste, Diamant (3µ) High shine polishing paste, diamond (3µ)

9646

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1_07/122021